


Thermopol - Set lustruire proteze

3 pasi simpli pentru a obtine proteze perfect lustruite

O munca mai usoara, pentru rezultate mai bune: pentru aceasta a fost conceput setul Thermopol de la HATHO. Designul revolutionar si tehnica de lucru va vor ajuta in procesul de lustruire nu doar a protezelor din acrilat, intr-un timp foarte scurt, ci si a protezelor din materiale flexibile precum Valplast si TCS. In acest kit este inclus tot ce aveti nevoie astfel incat lucrarile dumneavoastra sa fie cat mai stralucitoare posibil, printr-un proces foarte rapid si simplu.

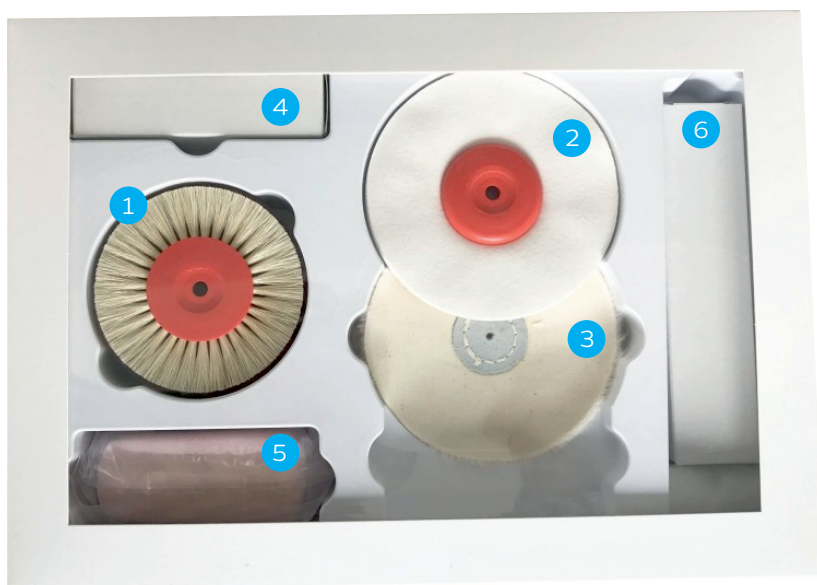

Pachetul contine:

- 1 2 perii albe cu burete Φ 80 mm
- 2 1 perie bumbac Φ 100mm
- 3 1 perie microfibra 14 straturi Φ 100mm
- 4 1 pasta tip pumice
- 5 1 pasta luciu final, Pro Rosa
- 6 1 emulsie



PASUL 1 PRE-LUSTRUIRE

Folositi peria alba cu burete impreuna cu pasta tip pumice, fabricata dintr-un amestec de ceara moale cu granulatia fina, la 1800 rpm.



PASUL 2 LUSTRUIRE

Folositi peria de bumbac, cu diametrul de 100 mm si un mijloc de plastic rezistent.



PASUL 3 LUCIU FINAL

Folositi peria de microfibra, 14 straturi, diametru de 100 mm impreuna cu pasta pentru luciu final Pro Rosa, cu o granulatia foarte fina.

*Pozele produselor au caracter orientativ si pot fi modificate de catre producator fara o notificare in prealabil.